

Frecuencia de Uso de Mascarilla



Los modelos de mascarilla N95 y KN95, son los únicos autorizados para utilizar dentro de la operación.

- ✓ Cada mascarilla tiene un una pinta de color en una de sus bandas elásticas, para distinguirse de las demás.

BANDA ELÁSTICA
CON PINTA **AZUL**

BANDA ELÁSTICA
CON PINTA **ROJA**

BANDA ELÁSTICA
CON PINTA **VERDE**

BANDA ELÁSTICA
CON PINTA **BLANCA**

- ✓ La frecuencia de uso esta asociada a dicho color y determinada de la siguiente manera:

DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9

- ✓ Después del uso diario, la mascarilla se guarda hasta el día que corresponda su reutilización.
- ✓ Luego de reutilizada, la mascarilla se debe eliminar.

#YO TE CUIDO, TÚ ME CUIDAS